

SCHIACCIARE  PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 13

LABBRA: LA VELOCITA' PREIMPOSTATA - LIVELLO 6



FIG 13

SCHIACCIARE  PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 14

AREOLA: LA VELOCITA' PREIMPOSTATA - LIVELLO 5



FIG 14

SCHIACCIARE 

PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 15  
IL TEMPO DI DIFAVLT E' 90 MIN  
IL TEMPO MASSIMO E' 99 MIN

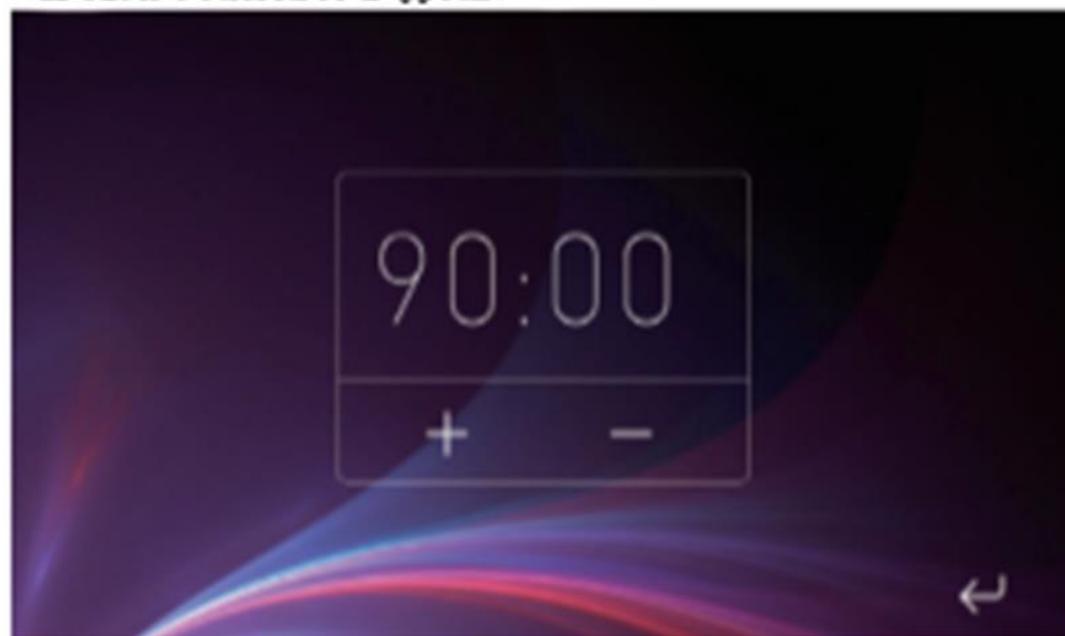


FIG 15  
**SPEGNIMENTO DELL'ALIMENTATORE**

SCHIACCIARE 

PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 16

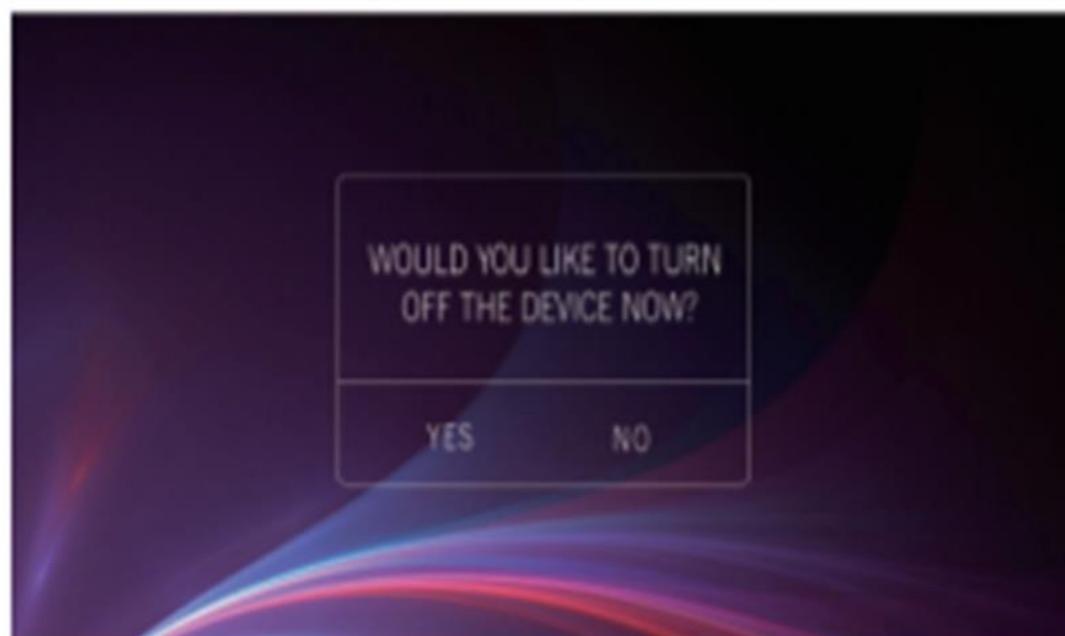


FIG 16

## UTILIZZO DI STILO PER TOCCARE LO SCHERMO 10




## PENNA INTELLIGENTE AUTOMATIZZATA



LA MACCHINETTA SI ACCENDERA' AUTOMATICAMENTE QUANDO VERRA'  
SPOSTATA DALL'AREA DI COLLOCAMENTO  
LA MACCHINETTA SI SPEGNERA' AUTOMATICAMENTE QUANDO VERRA'  
APPOGGIATA IN AREA DI COLLOCAMENTO

1. TOGLIERE LA CARTUCCIA DALLA CONFEZIONE
2. INSERIRE LA CARTUCCIA NELLA SNALATURE DELLA MACCHINETTA
3. GIRARE NEL SENSO ORARIO PER BLOCCARLA  
NEL SENSO ANTIORARIO PER TOGLIERLA
4. AGGIUSTAMENTO DELLA FUORIUSCITA DELL'AGO  
PUO' ESSERE COMPIUTA SOLO ACCENDENDO LA MACCHINETTA

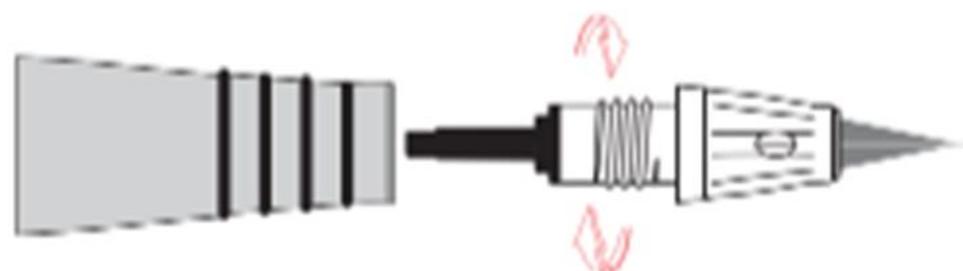


## REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA'

LA FUORIUSCITA DELL'AGO PUO' ESSERE REGOLATE TRAMITE IL REGOLATORE DELLA PROFONDITA'

GIRARE NEL SENSO ORARIO PER AUMENTARE LA FUORIUSCITA DELL'AGO

GIRARE NEL SENSO ANTIORARIO PER DIMINUIRE LA FUORIUSCITA DELL'AGO

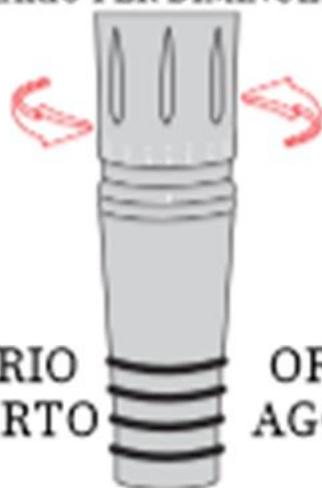

ANTIORARIO  
AGO PIU' CORTO

ORARIO  
AGO PIU' LUNGO



M1



L1



R3-M



R3-L



R5



F3



F4



F5



F7



F9



S3



S5



V9



V12



M9



M12



M24



M36



M42



Nano



P18

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	
CLASSIFICAZIONE	CONTENUTO
MODELLO	ARTMEX - V11
LICENZA	SI
SCOPO D'USO	PMU/ MTS
ADATTATORE	100V - 240V
PESO	2900g
SIZE	420mm*295mm*105mm

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ARTICOLO	QUANTITA'
ALIMENTATORE	1
MACCHINETTA	1
ADATTATORE	1
PEDALE	1
STILO	1

## MANTENIMENTO

### 1. MANUTENZIONE GENERALE

- MANTENERLO SPENTO. PULIRE LA SUPERFICIE CON IL PANNO ASCIUTTO
- TENERE LONTANO DALLA LUCE DIRETTA, ALTA TEMPERATURE E UMIDITA'
- NON AFFIDARE LA RIPARAZIONE AL PERSONALE NON COMPETENTE

### 2. ISPEZIONE

- CONTROLLARE IL DISPOSITIVO PRIMA DELL'USO
- SE IL DISPOSITIVO VIENE UTILIZZATO DOPO LUNGO TEMPO DI PAUSA, ASSICURARCI CHE FUNZIONA CORRETTAMENTE

	<b>CORRENTE ALTERNATIVA</b>		<b>SERIES NUMBER</b>
	<b>CORRENTE DIRETTA</b>		<b>RAPPRESENTANTE EU</b>
	<b>ATREZZATURA DELLA CLASSE 2</b>		<b>MARCHIO CE</b>
	<b>ATTENZIONE. LEGGERE I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO</b>		<b>PRODUTTORE</b>
	<b>DATA DELLA PRODUZIONE</b>		<b>PARTE APPLICATA ISOLATA DEL TIPO F</b>
	<b>LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E SEGUIRLE DURANTE</b>		
	<b>NON UTILIZZARE SE LA PRIMA CERA:</b> - HA LA MALATTIA OVI' LA PELLE - HA ALLERGIE O INFIEZIONI - HA DOLORI DEL VESTITO - SOFFRI DI DALL'ARTE - SE SPO' VIZIATO O INOPERANTE - SE NON COME LE NECESSARIO - SE NON HA UNO CONSIGLI DI UN MEDICO		
	<b>NON UTILIZZARE CON LA POTENZA OLTRE AC 220V</b>		
	<b>PUO' CAUSARE L'INCENDIO O MALFUNZIONAMENTO</b>		
	<b>NON UTILIZZARE IN VICINANZA AI POSTI CON ELEVATA TEMPERATURA, UMIDITA' O POLVERE. PUO' CAUSARE MALFUNZIONAMENTO.</b>		
	<b>NON REPARARE, DIASSEMBLARE IL DISPOSITIVO. PUO' CAUSARE MALFUNZIONAMENTO.</b>		
	<b>NON TOCCARE IL DISPOSITIVO O I CAVI CON MANI BAGNATE. PUO' CAUSE L'ELETTO-SHOCK.</b>		
	<b>NON USARE I CAVI ROTTI/MALFUNZIONANTI. PUO' CAUSARE L'INCENDIO. (CAMBIARE IL CAVO)</b>		
	<b>NON UTILIZZARE IL CORDONE PROPPEDATO CON SEGNI DI ROTTURA. PUO' CAUSARE DANNI O FERITE.</b>		
	<b>SE IL DISPOSITIVO NON VIENE USATO STACCARLO DALLA CORRENTE.</b>		
	<b>CONTROLLARE CHE IL DISPOSITIVO FUNZIONA BENE, NEL CASO CONTRARIO RIPARARLO.</b>		
	<b>NESSUNO OLTRE L'OPERATORE PUO' UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. PUO' CAUSARE MALFUNZIONAMENTO.</b>		

6. INSERIRE LA CARTUCCIA  
SCEGLIERE TRA LA MODALITA' PMU O MTS

7. SCHIACCIARE **+** O **-**  
PER SCEGLIERE IL LIVELLO DELLA VELOCITA'

10 LIVELLI DELLA VELOCITA', PIU' ALTO E' IL LIVELLO - PIU' ALTA E' LA VELOCITA'

LA PENNA SI SPEGNERA SE IL LIVELLO E' 0

8. SCHIACCIARE **▶**  
PER FAR PARTIRE LA MACCHINETTA  
**O USARE IL PEDALE**

9. AGGIUSTARE LA FUORIUSCITA DELL'AGO  
FUORIUSCITA MAX - 3mm

### MODALITA' MTS

LE OPERAZIONI MTS SONO UGUALI A PMU

SCHIACCIARE  PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 10

PERMANENT  
MAKE UP

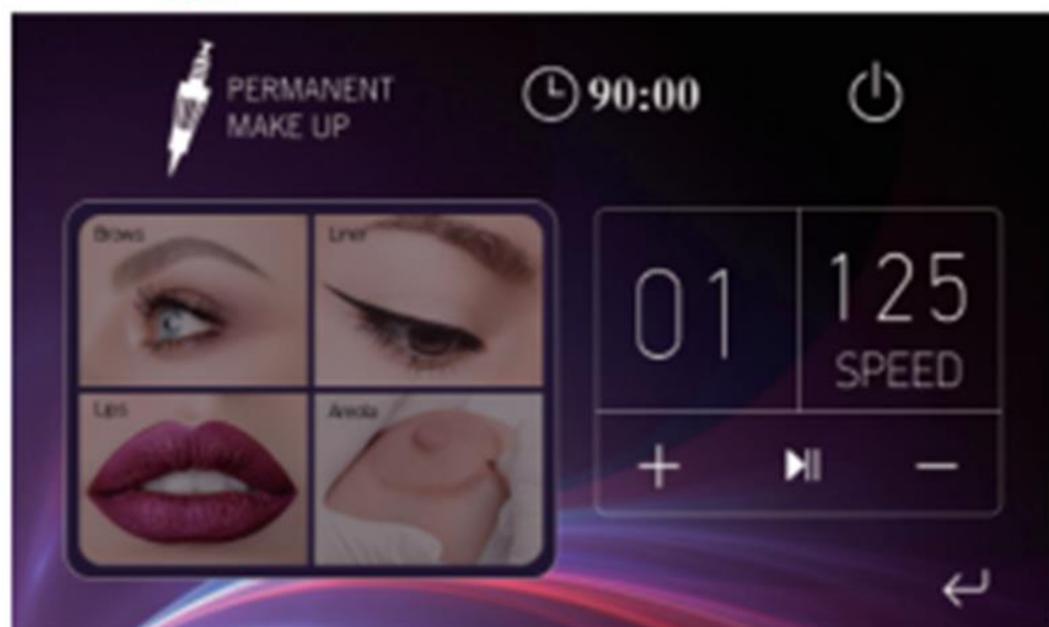


FIG 10

**SCEGLIERE LA MODALITA' ADATTA ALLA PROCEDURA**

SCHIACCIARE  PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 11

SOPRACCIGLIA : LA VELOCITA' PREIMPOSTATA - LIVELLO 6

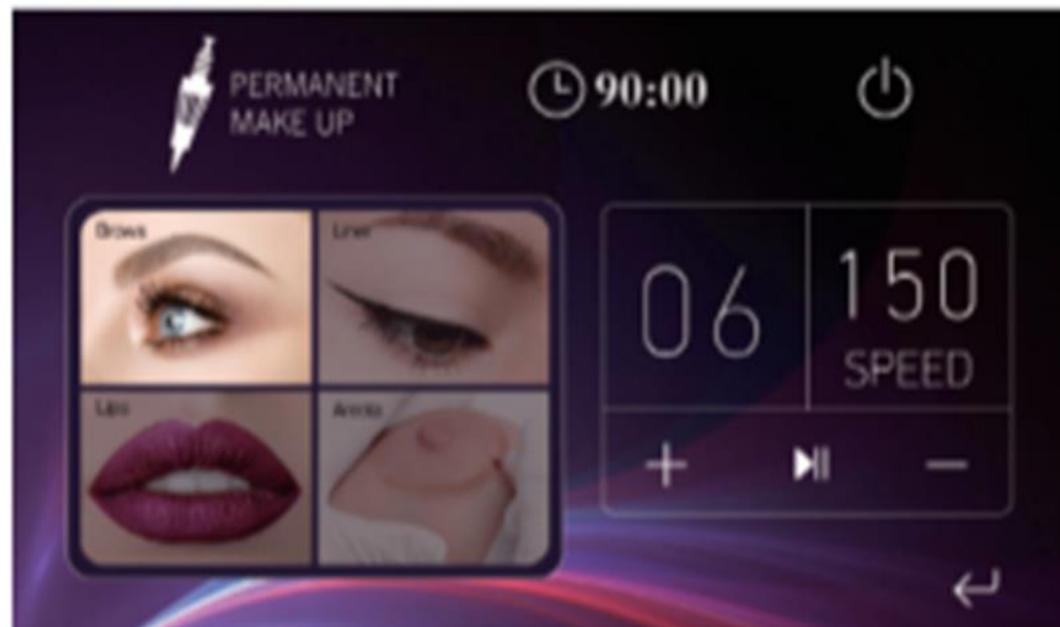


FIG 11

SCHIACCIARE  PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 12

EYE LINER: LA VELOCITA' PREIMPOSTATA - LIVELLO 4

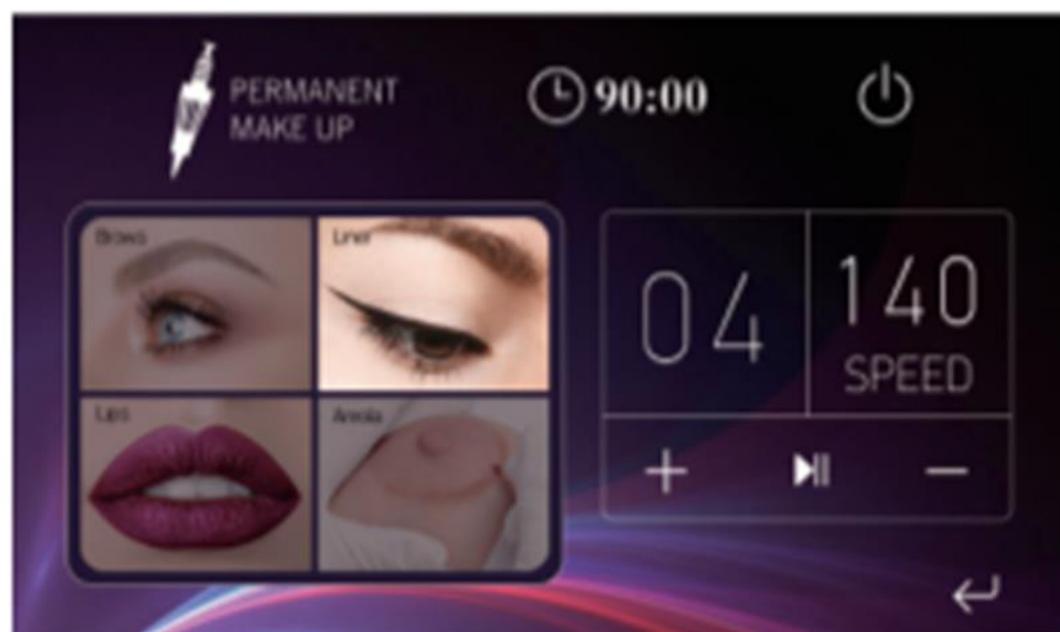


FIG 12