

ANKLEFREEZ®

Elevator cu suport pentru gleznă cu crioterapie



- Brevet unic: granule de zăpadă maleabile
- Reutilizabil
- Niciun risc de arsuri pentru piele
- Ușor de utilizat
- Cu acțiune prelungită, temperatură rece constantă
- Ergonomic

BENEFICIILE CRIOTERAPIEI

Medicii chirurgi recunosc și utilizează din ce în ce mai mult crioterapia în asociere cu compresia ca metodă de tratament postoperator.

O metodă naturală, aceasta **reduce nivelul de durere** având în același timp **efect antiinflamator** (reducând edemul), precum și un efect **antihemoragic** și **analgezic**.

Utilizarea sa facilitează recuperarea pacientului și duce la o creștere mai rapidă a mobilității reducând în același timp utilizarea de tratament medicamentos.

TERAPIE LA RECE DE URMĂTOAREA GENERAȚIE CU FREEZSNOW®

Pe baza acestei observații, Ambelio a brevetat o formulă nouă pentru o terapie cu acțiune prelungită, cu temperatură rece constantă cu Freezsnow®.

Agentul de răcire Freezsnow® este o substanță brevetată cu capacitate termală și conductivitate excelente. Freezsnow® oferă o zăpadă rece prin transformarea granulelor de gel în cristale de gheață fără risc de degerături.



Înainte

După

- **Nu lezează pielea:** fără risc de degerături.
- **Reutilizabil:** ușor de pregătit în congelator.
- **Răcire eficientă:** temperatură rece constantă cu acțiune prelungită.
- **Maleabil:** oferă contactul optimizat cu corpul chiar și în stare congelată.
- **Confort:** segmentată special pentru a se mula după morfologia pacientului.



DESCRIERE ANKLEFREEZ®



Elevatorul cu suportul pentru gleznă cu crioterapie ANKLEFREEZ® oferă tratament la rece cu acțiune prelungită (până la 1 oră). Acesta oferă o carcasă cu ortează pentru gleznă (elevator cu suport pentru gleznă) cu o gheață. Este dotată cu patru pachete reci cu acțiune prelungită Freezsnow® (inclusiv un set de rezervă).

Sistemul de fixare cu arici permite reglarea adecvată a ghetei pentru pacient (dimensionare ajustabilă).

INDICAȚII

- Postoperator după intervenția chirurgicală la nivelul labei piciorului (bursectomie) și al gleznei.
- Traumatologia labei piciorului și a gleznei.
- Recuperarea labei piciorului și a gleznei.
- Analgezic.
- Recuperarea sportivă.




RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

- 1** Scoateți pachetul rece din congelator. Poziționați-l pe laba piciorului.




Pachet rece

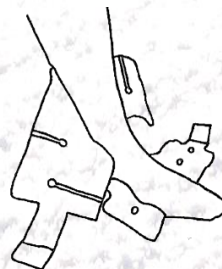


Poziționați pe laba piciorului

- 2** Ajustați pachetul rece în jurul gleznei dvs. și al labei piciorului folosind sistemul de prindere cu arici.

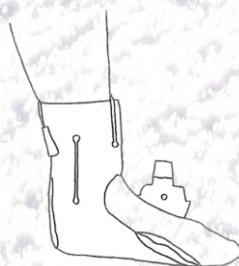

Pachet rece

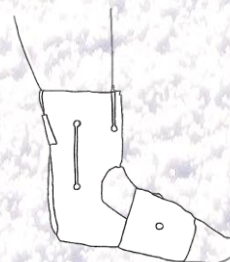


Ajustați în jurul labei piciorului

- 3** Pentru mărimi mari, pachetul rece trebuie rotit în sens invers (bursectomie).




Pachet rece rotit invers

4 Poziționați gheata peste pachetul rece.

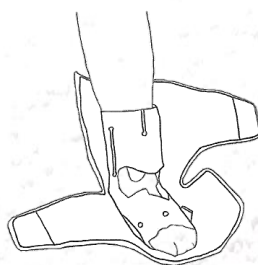


Poziționați gheata

5 Fixați gheata folosind sistemul de fixare cu arici. Scoateți carcasa ortezei pentru gleznă.

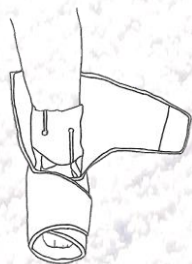


gheată cu arici

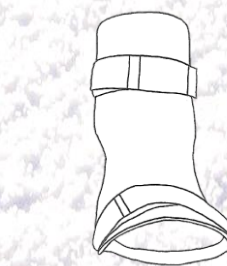


carcasă orteză gleznă

6 Poziționați carcasa ortezei pentru gleznă (elevatorul cu suport pentru gleznă) pe gheată conform diagramei, strângând curea superioară.

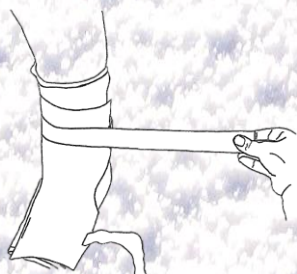

Carcasă cu orteză pentru gleznă

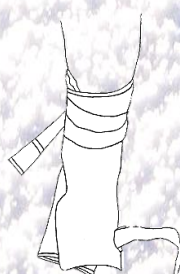


Curea superioară strânsă



7 Apoi strângeți cureaua inferioară.



Curea inferioară strânsă

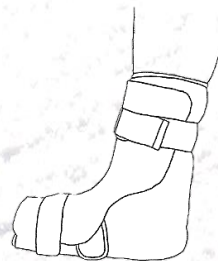

Vedere laterală

INFORMAȚII ESENȚIALE

Cele două pachete reci Freezsnow® trebuie amplasate în congelator (în pungă etanșă furnizată) timp de cel puțin 4 până la 6 ore înainte de utilizare.

Important: distribuiți granulele de gel uniform înainte de congelare și congelați pachetul rece plat pentru o mai bună distribuție a temperaturii. Așteptați unul până la două minute după ce îl scoateți din congelator pentru a netezi deformările.

Păstrați pachetele reci în congelator după sau între utilizări.

Aplicați tratamentul rece în cicluri de 30 de minute sau conform indicațiilor cadrului medical calificat.

Coduri

0ANKLUS0000

Descriere

ANKLEFREEZ® One Size

Ambalaje

1



ZA de Beauséjour
Rue de l'Aiguillage
35520 LA MEZIERE
FRANCE

contact@ambelio.com
www.ambelio.com



Carefully read the instructions for use that comes with the medical device or labeling provided to medical professionals. Class I device. Document not legally binding – Can be modified without prior notice. Manufactured by AMBELIO © 2019, Ref BRANKLRO – v01.121220

