

# HANDFREEZ®

Suport pentru încheietura mâinii cu crioterapie



- Brevet unic: granule de zăpadă maleabile
- Reutilizabil
- Niciun risc de arsuri pentru piele
- Ușor de utilizat
- Cu acțiune prelungită, temperatură rece constantă
- Ergonomic

## BENEFICIILE CRIOTERAPIEI

Medicii chirurgi recunosc și utilizează din ce în ce mai mult crioterapia în asociere cu compresia ca metodă de tratament postoperator.

O metodă naturală, aceasta **reduce nivelul de durere** având în același timp **efect antiinflamator** (reducând edemul), precum și un efect **antihemoragic** și **analgezic**.

Utilizarea sa facilitează recuperarea pacientului și duce la o creștere mai rapidă a mobilității reducând în același timp utilizarea de tratament medicamentos.

## TERAPIE LA RECE DE URMĂTOAREA GENERAȚIE CU FREEZSNOW®

Pe baza acestei observații, Ambelio a brevetat o formulă nouă pentru o terapie cu acțiune prelungită, cu temperatură rece constantă cu Freezsnow®.

Agentul de răcire Freezsnow® este o substanță brevetată cu capacitate termală și conductivitate excelente. Freezsnow® oferă o zăpadă rece prin transformarea granulelor de gel în cristale de gheață fără risc de degerături.



Înainte

După

- **Nu lezează pielea:** fără risc de degerături.
- **Reutilizabil:** ușor de pregătit în congelator.
- **Răcire eficientă:** temperatură rece constantă cu acțiune prelungită.
- **Maleabil:** oferă contactul optimizat cu corpul chiar și în stare congelată.
- **Confort:** segmentată special pentru a se mula după morfologia pacientului.



## DESCRIERE HANDFREEZ®



Suportul pentru încheietura mâinii cu crioterapie HANDFREEZ® combină tratamentul la rece cu acțiune prelungită (până la 1 oră) și compresia. Acesta este furnizat împreună cu un pachet rece cu acțiune prelungită Freezsnow® care poate fi fixat în interiorul suportului pentru încheietura mâinii, plus un set de rezervă. Sistemul de fixare cu arici permite reglarea susținerii adecvate pentru pacient (dimensionare ajustabilă).

Sistemul marcajelor S (Stânga) și D (Dreapta) permite suportului pentru încheietura mâinii să fie utilizat pe orice parte (încheietura mâinii stângi sau drepte: model ambidextru).


## INDICAȚII

- Postoperator după intervenția chirurgicală la nivelul încheieturii mâinii.
- Trauma încheieturii mâinii.
- Recuperarea sportivă.



## RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

- 1** Scoateți pachetul rece (furnizat împreună cu încheietura mâinii) din congelator. Fixați pachetul rece în jurul încheieturii mâinii folosind urechile cu arici (A, B, C și D).

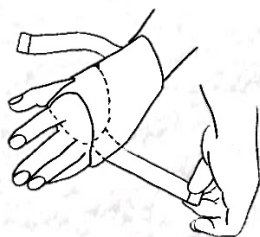

**A**



**B**



**C**




**D**

Poziționați cadrul detașabil pe partea corespunzătoare a încheieturii mâini (E, F și G).


- 2** Pentru utilizarea pe partea dreaptă, amplasați cele două marcaje „D” (dreapta) unul lângă celălalt (F).  
Pentru partea stângă, amplasați cele două marcaje „S” (stânga) unul lângă celălalt (G și H).




**E**

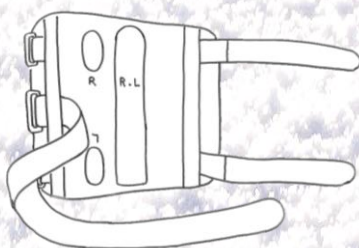

**F**

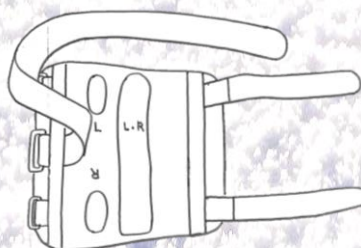

**G**

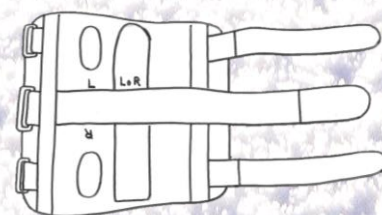


**H**




# FREEZSNOW®

- 3** Fixați suportul pentru încheietura mâinii (I). Treceți benzile superioară și inferioară prin deschideri (J).

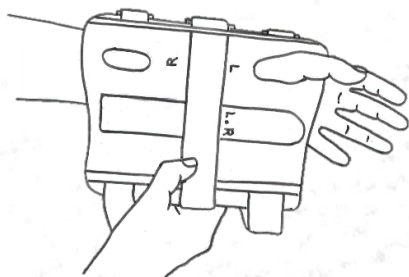


I

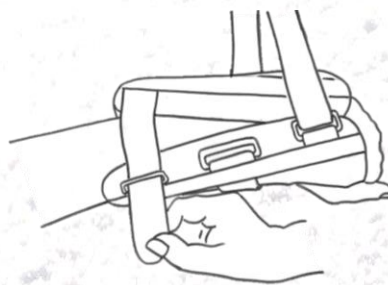


J

- 4** Strângeți benzile pentru a obține compresia dorită (K și L).

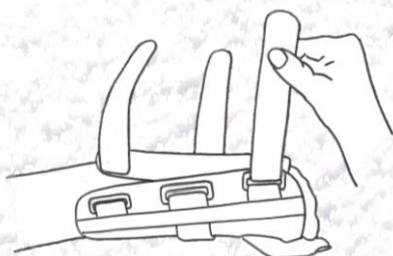


K

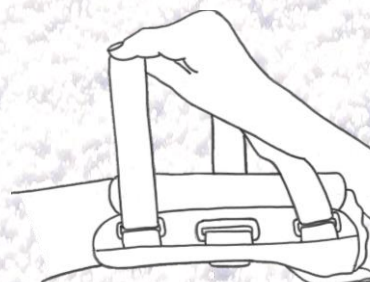


L


- 5** Apoi treceți banda centrală prin deschidere, aducând-o în față conform diagramei, și înfășurați-o în jurul încheieturii mâinii (M, N și O).

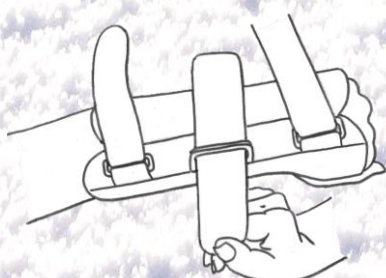

M

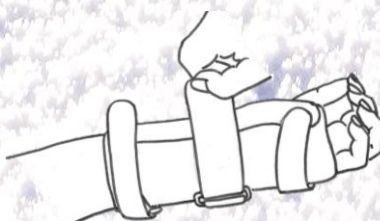

N

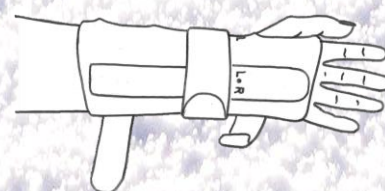

O

## INFORMAȚII ESENȚIALE

Cele două pachete reci Freezsnow® trebuie amplasate în congelator (în punga etanșă furnizată) timp de cel puțin 4 până la 6 ore înainte de utilizare.

**Important:** distribuiți granulele de gel uniform înainte de congelare și congelați pachetul rece plat pentru o mai bună distribuție a temperaturii. Așteptați unul până la două minute după ce îl scoateți din congelator pentru a netezi deformările.

Păstrați pachetele reci în congelator după sau între utilizări.

Aplicați tratamentul rece în cicluri de 30 de minute sau conform indicațiilor cadrului medical calificat.

### *Coduri*

### *Descriere*

### *Ambalaje*

0HANDUS0000 HANDFREEZ® One Size

1



ZA de Beauséjour  
Rue de l'Aiguillage  
35520 LA MEZIERE  
FRANCE  
[contact@ambelio.com](mailto:contact@ambelio.com)  
[www.ambelio.com](http://www.ambelio.com)

Carefully read the instructions for use that comes with the medical device or labeling provided to medical professionals. Class I device. Document not legally binding – Can be modified without prior notice. Manufactured by AMBELIO © 2019, Ref BRHANDRO – v01.121220

