

KNEEFREEZ®

Suport pentru genunchi cu crioterapie



- Brevet unic: granule de zăpadă maleabile
- Reutilizabil
- Niciun risc de arsuri pentru piele
- Ușor de utilizat
- Cu acțiune prelungită, temperatură rece constantă
- Ergonomic

BENEFICIILE CRIOTERAPIEI

Medicii chirurgi recunosc și utilizează din ce în ce mai mult crioterapia în asociere cu compresia ca metodă de tratament postoperator.

O metodă naturală, aceasta **reduce nivelul de durere** având în același timp **efect antiinflamator** (reducând edemul), precum și un efect **antihemoragic** și **analgezic**.

Utilizarea sa facilitează recuperarea pacientului și duce la o creștere mai rapidă a mobilității reducând în același timp utilizarea de tratament medicamentos.

TERAPIE LA RECE DE URMĂTOAREA GENERAȚIE CU FREEZSNOW®

Pe baza acestei observații, Ambelio a brevetat o formulă nouă pentru o terapie cu acțiune prelungită, cu temperatură rece constantă cu Freezsnow®.

Agentul de răcire Freezsnow® este o substanță brevetată cu capacitate termală și conductivitate excelente. Freezsnow® oferă o zăpadă rece prin transformarea granulelor de gel în cristale de gheață fără risc de degerături.



Înainte

După

- **Nu lezează pielea:** fără risc de degerături.
- **Reutilizabil:** ușor de pregătit în congelator.
- **Răcire eficientă:** temperatură rece constantă cu acțiune prelungită.
- **Maleabil:** oferă contactul optimizat cu corpul chiar și în stare congelată.
- **Confort:** segmentată special pentru a se mula după morfologia pacientului.



DESCRIERE KNEEFREEZ®



Suportul pentru genunchi cu crioterapie KNEEFREEZ® combină tratamentul la rece cu acțiune prelungită (până la 1 oră) și compresia. Este fabricată din material care se întinde pentru compresie cu două articulații metalice ranforsate, laterale, detașabile. Orteza este frunizată împreună cu pachete reci cu acțiune prelungită Freezsnow® (inclusiv un set de rezervă).

Sistemul de fixare cu arici permite reglarea susținerii adecvate pentru pacient (dimensionare ajustabilă).


INDICAȚII

- Postoperator după intervenția chirurgicală la nivelul genunchiului sau leziunile ligamentului.
- Trauma genunchiului (rupturi sau întinderi).
- Reabilitarea genunchiului.
- Analgezic.
- Recuperarea sportivă.




RECOMANDĂRI DE UTILIZARE


- 1** Deschideți orteza și scoateți articulațiile laterale pentru aplicarea postoperatorie.

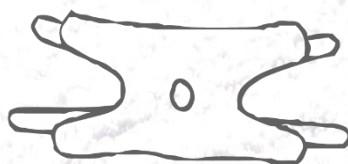

- 2** Scoateți un pachet mare rece și unul mic din congelator. Poziționați cele 4 urechi cu arici în interiorul ortezei pentru genunchi și apoi puneți în interiorul ortezei pachetul rece mare.

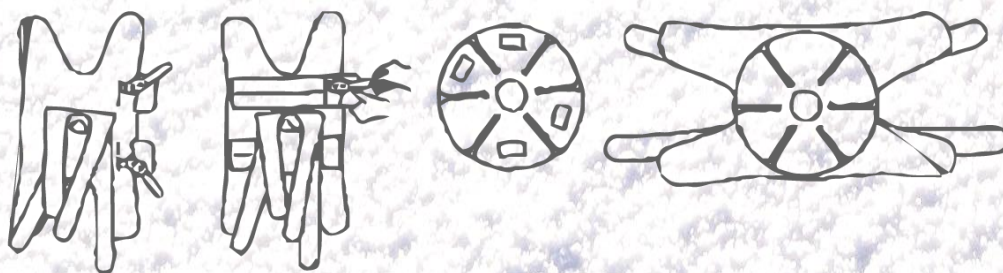


- 3** Poziționați pachetul rece mic pe partea membrului care trebuie răcit.

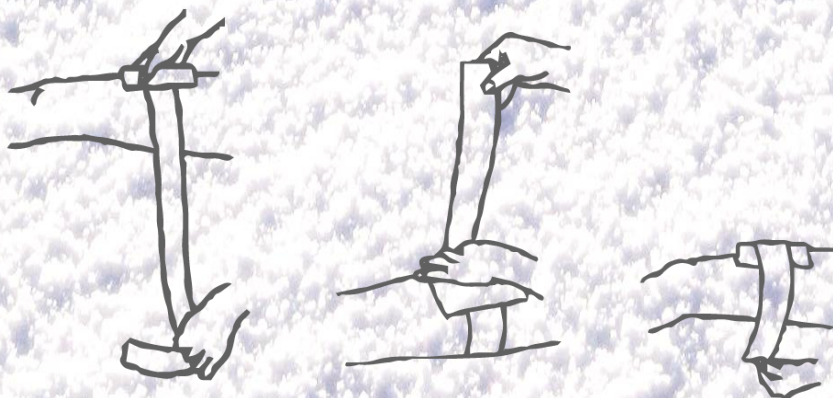

- 4** Poziționați orteza pentru genunchi pe genunchi, astfel încât rotula să apară prin deschidere. Fixați urechile mari pentru genunchi superioare posterioare, apoi fixați urechile mari pentru genunchi inferioare posterioare.




- 5** Amplasați urechea superioară a benzii superioare în spatele coapsei. Atașați-o la orteza pentru genunchi, aplicând compresie adecvată. Apoi atașați cea de-a doua ureche superioară.

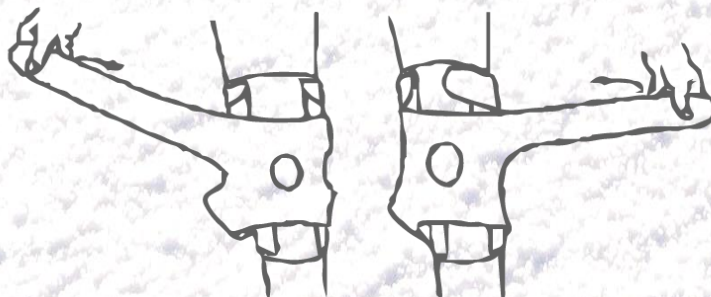

- 6** Duceți prima ureche inferioară în spatele gambei. Apoi procedați în aceeași manieră cu cea de-a doua.



- 7** Prima ureche inferioară se duce în jurul gambei. Atașați-o la orteza pentru genunchi. Procedați în aceeași manieră cu cea de-a doua ureche.

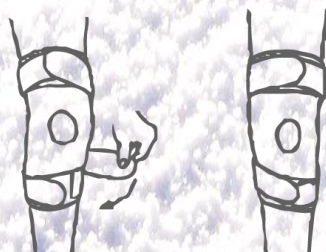



INFORMAȚII ESENȚIALE

Cele două pachete reci Freezsnow® trebuie amplasate în congelator (în punga etanșă furnizată) timp de cel puțin 4 până la 6 ore înainte de utilizare.

Important: distribuiți granulele de gel uniform înainte de congelare și congelați pachetul rece plat pentru o mai bună distribuție a temperaturii. Așteptați unul până la două minute după ce îl scoateți din congelator pentru a netezi deformările.

Păstrați pachetele reci în congelator după sau între utilizări.

Aplicați tratamentul rece în cicluri de 30 de minute sau conform indicațiilor cadrului medical calificat.

Coduri

Descriere

Ambalaje

OKNEEUS0000

KNEEFREEZ® One size

1



Carefully read the instructions for use that comes with the medical device or labeling provided to medical professionals. Class I device. Document not legally binding – Can be modified without prior notice. Manufactured by AMBELIO © 2019, Ref BRKNEERO – v01.121220



ZA de Beauséjour
Rue de l'Aiguillage
35520 LA MEZIERE
FRANCE

contact@ambelio.com
www.ambelio.com