

SHOULDERFREEZ®

Orteză de umăr cu crioterapie



- Brevet unic: granule de zăpadă maleabile
- Reutilizabil
- Niciun risc de arsuri pentru piele
- Ușor de utilizat
- Cu acțiune prelungită, temperatură rece constantă
- Ergonomic

BENEFICIILE CRIOTERAPIEI

Medicii chirurgi recunosc și utilizează din ce în ce mai mult crioterapia în asociere cu compresia ca metodă de tratament postoperator.

O metodă naturală, aceasta **reduce nivelul de durere** având în același timp **efect antiinflamator** (reducând edemul), precum și un efect **antihemoragic** și **analgezic**.

Utilizarea sa facilitează recuperarea pacientului și duce la o creștere mai rapidă a mobilității reducând în același timp utilizarea de tratament medicamentos.

TERAPIE LA RECE DE URMĂTOAREA GENERAȚIE CU FREEZSNOW®

Pe baza acestei observații, Ambelio a brevetat o formulă nouă pentru o terapie cu acțiune prelungită, cu temperatură rece constantă cu Freezsnow®.

Agentul de răcire Freezsnow® este o substanță brevetată cu capacitate termală și conductivitate excelente. Freezsnow® oferă o zăpadă rece prin transformarea granulelor de gel în cristale de gheață fără risc de degerături.



Înainte

După

- **Nu lezează pielea:** fără risc de degerături.
- **Reutilizabil:** ușor de pregătit în congelator.
- **Răcire eficientă:** temperatură rece constantă cu acțiune prelungită.
- **Maleabil:** oferă contactul optimizat cu corpul chiar și în stare congelată.
- **Confort:** segmentată special pentru a se mula după morfologia pacientului.



DESCRIERE SHOULDERFREEZ®




Orteza de umăr cu crioterapie SHOULDERFREEZ® combină tratamentul la rece cu acțiune prelungită (până la 1 oră) și compresia. Aceasta permite și imobilizarea umărului. Este furnizată cu două pachete reci cu acțiune prelungită Freezsnow® (inclusiv un set de rezervă) care vor fi atașate în interiorul ortezei. Sistemul de fixare cu arici permite reglarea susținerii adecvate pentru pacient (dimensionare ajustabilă).

Sistemul marcajelor S (Stânga) și D (Dreapta) permite ortezei de umăr să fie utilizată pe orice parte (umărul stâng sau drept: model ambidextru). Orteza de umăr cu crioterapie SHOULDERFREEZ® este ușor de aplicat fără asistență.

INDICAȚII

- Post-operator după intervenția chirurgicală la nivelul umărului.
- Trauma la nivelul umărului.
- Recuperarea sportivă.

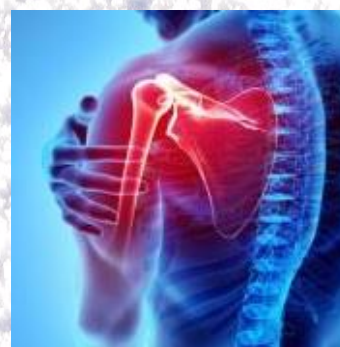


RECOMANDĂRI DE UTILIZARE


- 1** Poziționați benzile detașabile ale ortezei pentru umăr pentru partea corespunzătoare (D pentru partea dreaptă și S pentru partea stângă).



- 2** Scoateți pachetul rece din congelator. Folosind urechile cu benzi cu arici, poziționați pachetul albastru în interiorul protezei pentru umăr.

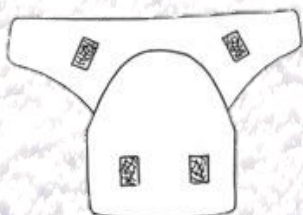

orteza pentru umăr deschisă pachetul rece albastru

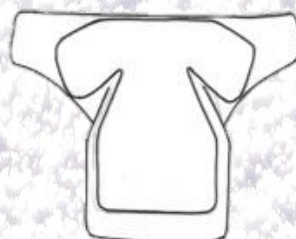

punga atașată la interiorul protezei pentru umăr







FREEZSNOW®

3

Ajustați urechile cu benzi cu arici la orteza pentru umăr.

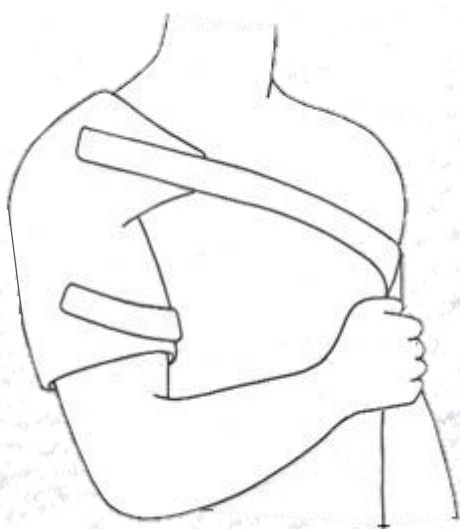


vederea frontală a umărului

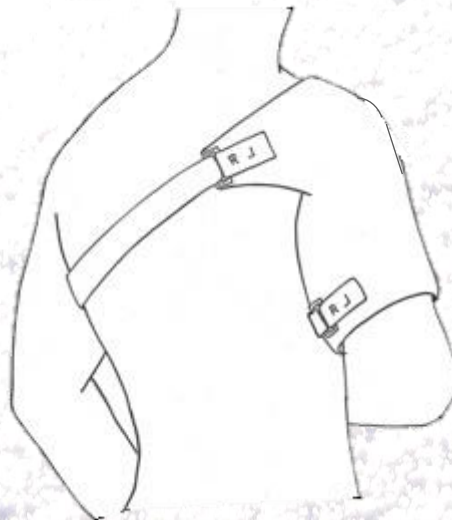

posterioare a umărului

4

Înfășurați fașa în jurul cotului și treceți-o în spatele dvs. și în sus până la umărul opus. Apoi băgați mâna prin buclă.

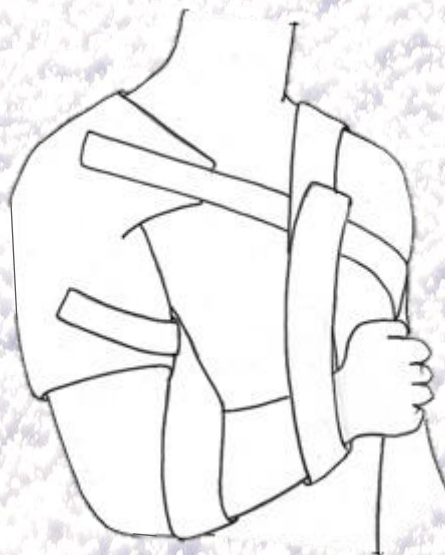

orteza pentru umăr fixată Vedere frontală



INFORMAȚII ESENȚIALE

Cele două pachete reci Freezsnow® trebuie amplasate în congelator (în punga etanșă furnizată) timp de cel puțin 4 până la 6 ore înainte de utilizare.

Important: distribuiți granulele de gel uniform înainte de congelare și congelați pachetul rece plat pentru o mai bună distribuție a temperaturii. Așteptați unul până la două minute după ce îl scoateți din congelator pentru a netezi deformările.

Păstrați pachetele reci în congelator după sau între utilizări.

Aplicați tratamentul rece în cicluri de 20 de minute sau conform indicațiilor cadrului medical calificat.

Coduri

Descriere

Ambalaje

0SHLDUS0000

SHOULDERFREEZ® One size

1



Carefully read the instructions for use that comes with the medical device or labeling provided to medical professionals. Class I device. Document not legally binding – Can be modified without prior notice. Manufactured by AMBELIO © 2019, Ref BRSHLDRO – v01.121220



Ambelio

ZA de Beauséjour
Rue de l'Aiguillage
35520 LA MEZIERE
FRANCE
contact@ambelio.com
www.ambelio.com